

HPV検査方法の変更について

これまでHC II法によるHPV-DNA同定後、クリニチップによるHPVジェノタイプ判定を行っていましたが、2020年7月1日よりOnclarityによる簡易ジェノタイプ(9種判別)判定後、MEBGENによるHPVジェノタイプ判定(型判別)に変更となります。

容器および採取器具はこれまでと同じですので、検体採取法に変更はございません。

HPV検査報告書はこれまでと様式は同じですが、結果の見方が異なりますのでご注意ください。

検査項目名称		測定値	材料	基準値	単位	保点
HPVジェノタイプ判定						
検出型	16					2000
検出型	33					
検出型	以下余白					
検出型						
検出型						
HPV簡易ジェノタイプ(9種判別)						
HPV判定	陽性					検出せず
16型判定	陽性					
18型判定	検出せず					
31型判定	検出せず					
45型判定	検出せず					
51型判定	検出せず					
52型判定	検出せず					
33/58型判定	陽性					
35/39/68型判定	検出せず					
56/59/66型判定	検出せず					

型判定検査

スクリーニング検査

検査項目名称	測定値	材料	基準値
HPVジェノタイプ判定			
検出型	16		
検出型	33		
検出型	以下余白		
検出型			
検出型			
HPV簡易ジェノタイプ(9種判別)			
HPV判定	陽性		検出せず
16型判定	陽性		
18型判定	検出せず		
31型判定	検出せず		
45型判定	検出せず		
51型判定	検出せず		
52型判定	検出せず		
33/58型判定	陽性		
35/39/68型判定	検出せず		
56/59/66型判定	検出せず		

型判定で「33型」と決定

型判定でも「16型」が確定

「33型または58型」が陽性という意味です

⇒「16型と33型」が陽性と判定